



# SMR

MODULAR SHOULDER REPLACEMENT

**SMR AXIOMA® TT METAL BACK GLENOID**

INSTRUMENT  
DEMONTERING OCH  
**MONTERINGS-**  
INSTRUKTIONER



# DEMONTERING-/MONTERINGS INSTRUKTION

## Innehållsförteckning

04

### Borraxel till glenoidborr

9013.75.350

Sid. >> 04



10

### Extraktor basplatta glenoid Small-R

9013.75.391 och Extraktor basplatta glenoid

Small/std 9013.75.392


Sid. >> 10

06

### Handtag benpackare

9013.75.370

Sid. >> 06

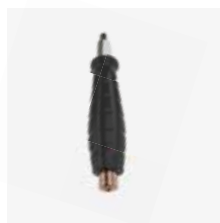

12

### Handtag till extraktor

9095.11.250

Sid. >> 12

08

### Pressverktyg för glenoid

9013.75.390

Sid. >> 08



14

### Kannylerad borrar för extraktion peg Small-R

9013.75.395 och Kannylerad borrar för

extraktion peg small/std 9013.75.396

Sid. >> 14

Detta dokument avser SMR Axioma® TT Metal Back Instrument Set 9013.35.000

#### OBSERVERA

LÄS ÄVEN BRUKSINFORMATION FÖR INSTRUMNETVÅRD, DESINFEKTION OCH STERILISERING SOM KAN  
LADDAS NED FRÅN [www.limacorporate.com](http://www.limacorporate.com)


# DEMONTERING-/MONTERINGS INSTRUKTION

## Borraxel till glenoidborr



9013.75.350  
Borraxel till glenoidborr

### DEMONTERING INSTRUKTION

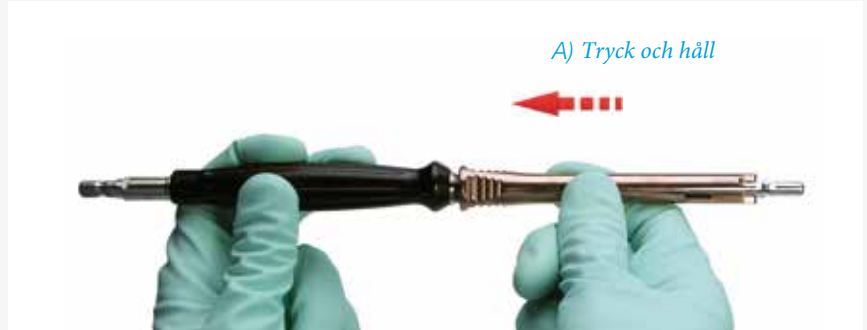

01 Tryck den kromfärgade delen in mot mitten av borraxel.



02 Rotera den kromfärgade delen och dra av hylsan från borraxel.



03 Avlägsna det svarta handtaget.



Borraxel till glenoidborr

MONTERINGS INSTRUKTION



- 01 För att montera borraxel till glenoidborr måste du utföra samma steg i omvänd ordning. För att låsningsmekanismen ska fungera måste märkning "neutral" vara mitt för stopp-pinnen, enligt bilden.

9013.75.350  
Borraxel till glenoidborr


# DEMONTERING-/MONTERINGS INSTRUKTION

## Handtag benpackare




9013.75.370 (Handtag benpackare)

### DEMONTERINGS INSTRUKTION

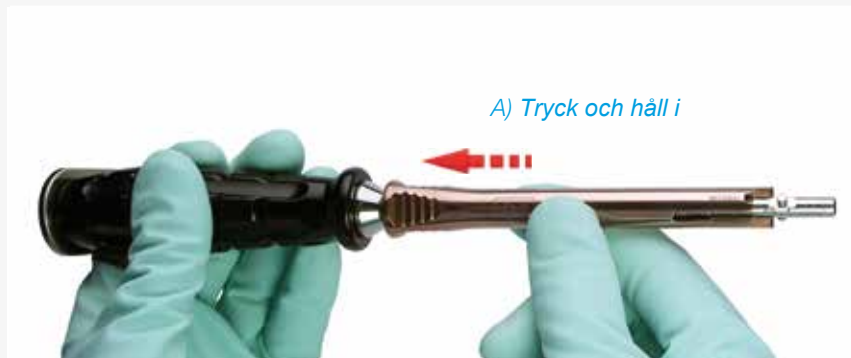

01 Håll i den kromfärgade delen och tryck mot mitten av handtaget.

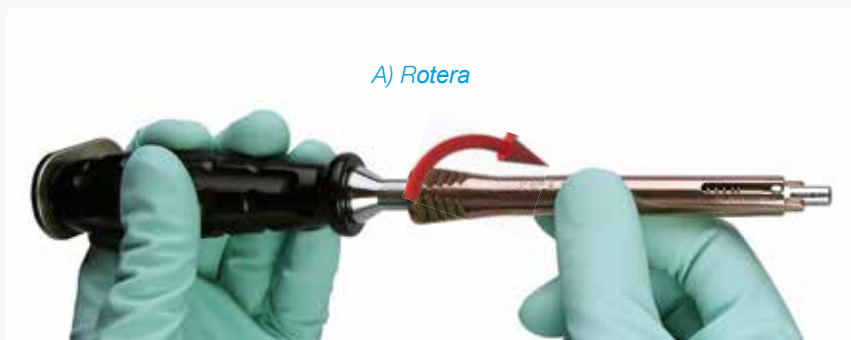

02 Roterar den kromfärgade hylsan.



03 Roterar och för av den kromfärgade hylsan från handtaget.

## MONTERINGS INSTRUKTION



- 01** För att montera handtaget måste du utföra samma steg fast i omvänd ordning.  
För att låsmekanismen ska fungera måste märkning "neutral" vara mitt för stopp-  
pinnen, enligt bilden.

**Cod. 9013.75.370** (Compactor Handle)

# DEMONTERING-/MONTERINGS INSTRUKTION

## Pressverktyg för gleniod



### DEMONTERING INSTRUKTION



**01** Lyft av den svarta plattan från sin avsedda plats. Dra nedåt i den svarta delen som sitter på den gängade stängen.



**02** Skruva lös den gängade stängen.

**9013.75.390**

Pressverktyg för glenoid/peg (4 delar)



# DEMONTERING-/MONTERINGS INSTRUKTION

## Pressverktyg för glenoid

### MONTERINGS INSTRUKTION



- 01** För att montera instrumentet måste du utföra samma steg fast i omvänd ordning. Skruva i den gängade delen, montera den svarta delen på stängen. Den svarta delen "klickar" fast på stängen.



- 02** Avslutningsvis så lägger man den svarta plattan på botten av pressverktyget, en avlång slits ska anpassas mot en svart klack på underisidan av plattan.

9013.75.390  
Pressverktyg för glenoid/peg

## DEMONTERING-/MONTERINGS INSTRUKTION

### Extraktor basplatta glenoid small-R och basplatta normal/std



**9013.75.391**

Extraktor basplatta glenoid Small-r (2 delar)

**9013.75.392**

Extraktor basplatta glenoid small/std (2 delar)

## DEMONTERING INSTRUKTION



**01** Skruva ut det inre staget från extraktionsverktyget.



**02** För ut det inre staget från extraktionsverktyget.

# DEMONTERING-/MONTERINGS INSTRUKTION

## Extraktor basplatta glenoid small-r och small/std

### MONTERINGS INSTRUKTION



**01** Skruva in det gängade staget i extraktionsverktyget.

---

**9013.75.391**  
Extraktor basplatta glenoid small-r (2 delar)

---

**9013.75.392** Extraktor basplatta glenoid  
small/std (2 delar)

---

# DEMONTERING-/MONTERINGS INSTRUKTION

## Handtag till extraktor



9095.11.250 Handtag till extraktor (2 delar)

+

9095.10.222 Skruvmejsel (AO-fattning,  
ingår i instrument 9013.30.000)

## DEMONTERING INSTRUKTION



01 Skruvad den kromfärgade delen motsols (använd ex. skruvmejsel "AO" eller skruvmejsel från instrument 9013.30.000).



02 Dra det kromfärgade staget ut från handtaget.

# DEMONTERING-/MONTERINGS INSTRUKTION

## Handtag till extraktor

### MONTERINGS INSTRUKTION



**01** För in det kromfärgade staget i handtaget.



**02** Skruva fast staget genom att skruva den kromfärgade delen medsols.

---

**9095.11.250** Handtag till extraktor (2 delar)

+

---

**9095.10.222** Skruvmejsel (AO-fattning, ingår i instrument 9013.30.000)

---

## DEMONTERING-/MONTERINGS INSTRUKTION

### Kannylerad borrh för extraktion peg small-r och small/std



**9013.75.395** Kannylerad borrh för extraktion peg small-r (4 delar)

**9013.75.396** Kannylerad borrh för extraktion peg small/std (4 delar)

## DEMONTERINGS INSTRUKTION



**01** För ut det inre staget ut ur den kannylerade borren.



**02** Avlägsna den blå hylsan.



**03** Avlägsna det svarta handtaget.



# DEMONTERING-/MONTERINGS INSTRUKTION

## Kannylerad borr för extraktion peg small-r och small/std

### MONTERINGS INSTRUKTION



**01** För det svarta handtaget i pilens riktning, viktigt! Den grövre delen av det svarta handtaget riktas in mot mitten av den kannylerade borren.



**02** Fäst den blå hylsan på det inre staget.



**03** För det inre staget med blå hylsa in i den kannylerade borren.

**9013.75.395** Kannylerad borr för extraktion  
peg small-r (4 delar)

**9013.75.396** Kannylerad borr för extraktion  
peg small/std (4 delar)











**Limacorporate spa**  
Via Nazionale, 52  
33038 Villanova di San Daniele  
Udine - Italy  
Tel.: +39 0432 945511  
Fax: +39 0432 945512  
E-mail: [info@limacorporate.com](mailto:info@limacorporate.com)  
[www.limacorporate.com](http://www.limacorporate.com)

**Lima Implantés slú**  
Fontsanta, 46 5ª planta  
08970 Sant Joan Despí - Barcelona  
Tel.: 93 480 85 05  
Fax: 93 419 65 27

**Lima France sas**  
Les Espaces de la Sainte Baume  
Parc d'Activité de Gémenos - Bât.A5  
30 Avenue du Château de Jouques  
13420 Gémenos - France  
Tel: +33 (0) 4 42 01 63 12  
Fax: +33 (0) 4 42 04 17 25  
E-mail: [info@limafrance.com](mailto:info@limafrance.com)

**Lima O.I. doo**  
Ante Kovacic, 3  
10000 Zagreb - Croatia  
Tel.: +385 (0) 1 2361 740  
Fax: +385 (0) 1 2361 745  
E-mail: [lima-oi@lima-oi.hr](mailto:lima-oi@lima-oi.hr)

**Lima Switzerland sa**  
Birkenstrasse, 49  
CH-6343 Rotkreuz - Zug  
Switzerland  
Tel.: +41 (0) 41 747 06 60  
Fax: +41 (0) 41 747 06 69  
E-mail: [info@lima-switzerland.ch](mailto:info@lima-switzerland.ch)

**Lima Japan kk**  
Shinjuku Center Building, 29<sup>th</sup> floor  
1-25-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku,  
Tokyo 163-0629 - Japan  
Tel.: +81 3 5322 1115  
Fax: +81 3 5322 1175

**Lima CZ sro**  
Do Zahrádek I., 157/5  
155 21 Praha 5 – Zličín –  
Czech Republic  
Tel.: +420 222 720 011  
Fax: +420 222 723 568  
E-mail: [info@limacz.cz](mailto:info@limacz.cz)

**Lima Deutschland GmbH**  
Kapstadtring 10  
22297 Hamburg - Germany  
Tel.: +49 40 6378 4640  
Fax: +49 40 6378 4649  
E-mail: [info@lima-deutschland.com](mailto:info@lima-deutschland.com)

**Lima Austria GmbH**  
Ignaz-Köck-Strasse 10 / Top 3.2  
1210 Wien - Austria  
Tel.: +43 (1) 2712 469  
Fax: +43 (1) 2712 469 100  
E-mail: [info@lima-austria.at](mailto:info@lima-austria.at)

**Lima SK s.r.o.**  
Zvolenská cesta 14  
97405 Banská Bystrica - Slovakia  
Tel.: +421 484 161 133  
Fax.: +421 484 161 138  
E-mail: [info@lima-sk.sk](mailto:info@lima-sk.sk)

**Lima Netherlands**  
Havenstraat 30  
3115 HD Schiedam  
The Netherlands  
Tel: +31 (0) 10 246 26 60  
Fax: +31 (0) 10 246 26 61  
[info@limanederland.nl](mailto:info@limanederland.nl)  
[www.limanederland.nl](http://www.limanederland.nl)

**Lima Implantés Portugal S.U. Lda**  
Rua Olavo D'Eça Leal N°6 Loja-1  
1600-306 Lisboa - Portugal  
Tel : +35 121 727 233 7

**Lima Orthopaedics Australia Pty Ltd**  
Unit 1, 40 Ricketts Rd  
Mt Waverley 3149  
Victoria Australia  
Tel.: +61 (03) 9550 0200  
Fax: +61 (03) 9543 4003  
[www.limaortho.com.au](http://www.limaortho.com.au)

**Lima Orthopaedics New Zealand Ltd**  
Zone 23, Unit 102, Edwin Street, Mt Eden  
Auckland 1024  
New Zealand  
Tel.: +64 (09) 531 5522  
Fax: +64 (09) 522 3380

**Lima Orthopaedics UK Limited**  
The Pavillon, Campus 5, Unit 1  
Third Avenue  
Letchworth Garden City  
Hertfordshire SG6 2JF  
United Kingdom  
Tel.: +44 08 45833 4435  
Fax: +44 08 45833 4436

**Lima USA Inc.**  
2106 W. Pioneer Parkway, Suite 126  
Arlington, TX 76013  
Tel.: +1 817-342-0240 / 800-962-2578  
Fax: +1 817-342-0241 / 800-962-2579

**Lima Sweden AB**  
Företagsallén 14 B  
SE-184 40 ÅKERBERGA  
Sweden  
Tel.: +46 8 544 103 87  
Fax: +46 8 540 862 68  
[www.linksSweden.se](http://www.linksSweden.se)

**Lima Italy**  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 – Palazzo F1  
20090 Assago - Milano - Italy  
Tel.: +39 02 57791301

**Hit Medica spa**  
Strada Borrana 38  
47899 Serravalle, Republic of San Marino  
Tel.: +378 0549 961911  
Fax: +378 0549 961912  
E-mail: [info@hitmedica.com](mailto:info@hitmedica.com)

